

使 用 说 明 书



DGA01 足底压力步态分析系统

目录



- 一、DGA01配置
- 二、DGA01使用、维护和安全
- 三、DGA01软件安装
- 四、DGA01软件启动
- 五、测量足部、足部分析
- 六、足部压力报告打印
- 七、故障排除
- 八、软件版权

一、DGA01配置

1.DGA01标准配置：压力板，USB电缆，布毯。



2.DGA01高级配置：DGA01标准+4个高清摄像头。

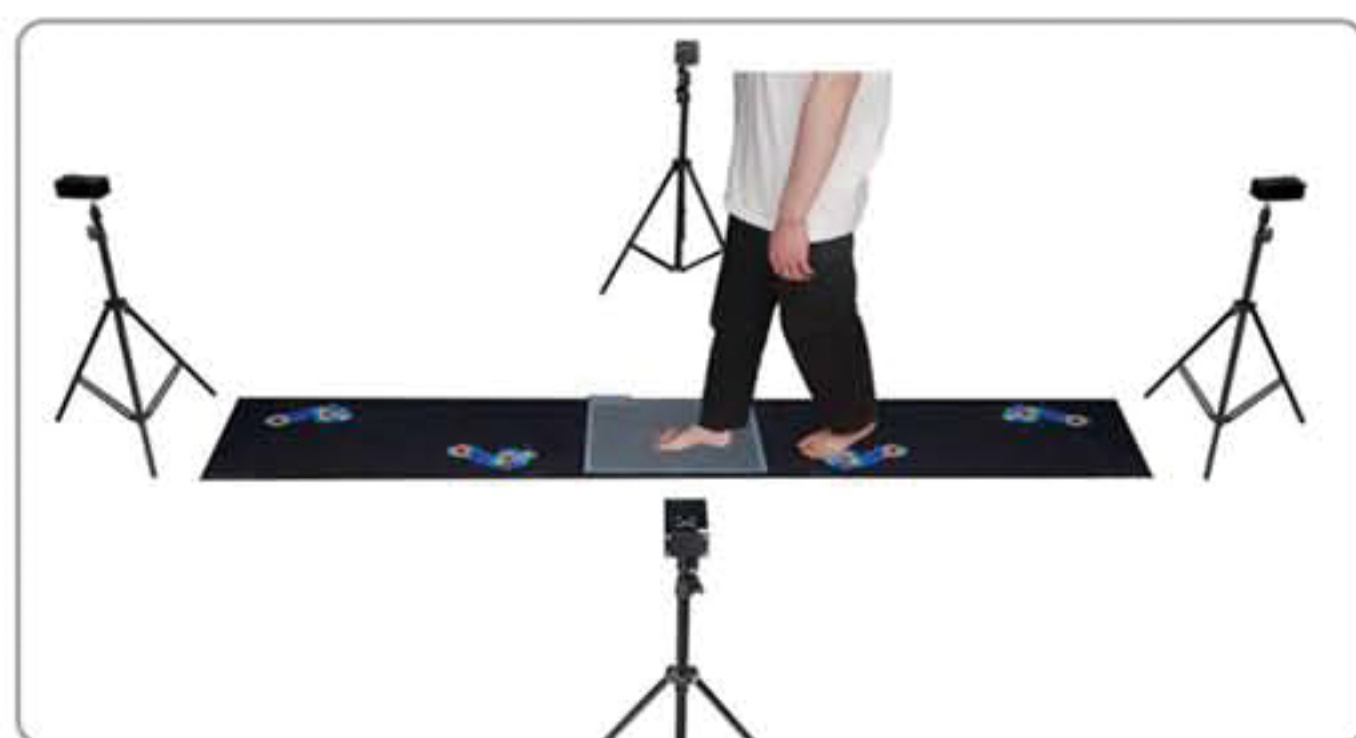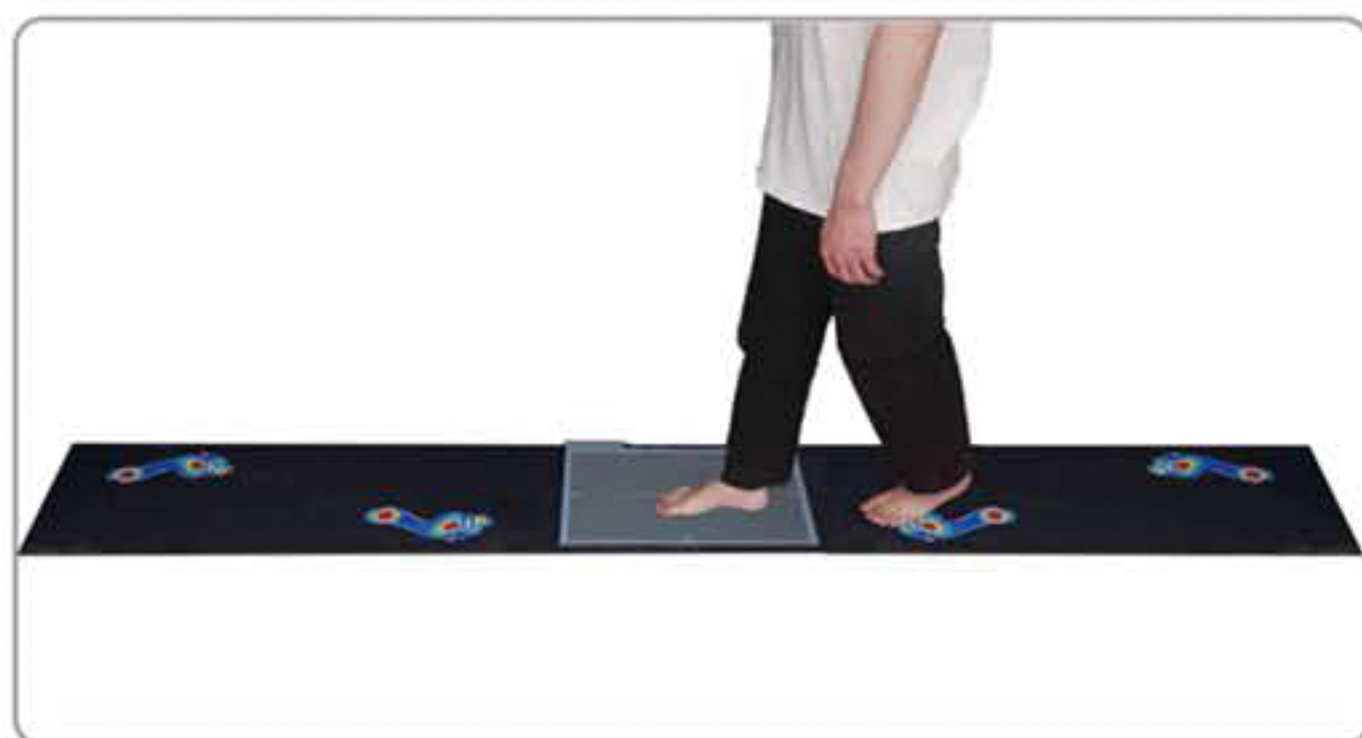


二、DGA01使用、维护和安全

- 1.测量之前，请擦干脚，污垢和灰尘请用软布清洁。
- 2.避免过度的冲击和振动。避免低温($<-5^{\circ}\text{C}$)或高温 ($>45^{\circ}\text{C}$)或高湿度。
- 3.不使用时请关闭扫描仪并断开电源。在运输过程中放置好压力板，以免碰撞造成损坏。
- 4.请勿拆卸压力板，仅由指定的专业人员进行服务和维修。
- 5.压力板表面由塑料制成，不能穿着尖锐的鞋子在上面走动。

三、DGA01软件安装

- 1.DGA01需要最低CPU Atom Z8350。RAM要求与4G相同。
- 2.仅安装在Windows10PC上，不支持Windows 7/8或Mac OS。在Windows管理员账户上安装，软件将无法在Windows用户账户上运行。某些防病毒软件可能会造成干扰，请将其关闭。我们建议使用1920X1080分辨率的显示器。
- 3.升级软件，请卸载以前的版本并手动删除安装的目录，然后安装新版本。硬件驱动程序安装在每个USB端口上。将压力板安装在一个USB端口上，但随后插入同一台PC上的另一个USB端口后，等待驱动程序自行安装。
- 4.运行软件安装文件。默认安装文件路径：C:\DGA\。安装文件路径只能包含英语。在使用外语A版本Windows的计算机上，完全支持语言A。如果以后安装了外语B的语言包，则可能不完全支持语言B。无论如何，始终支持英语。
- 5.该软件需要Microsoft .Net Framework才能运行。Windows 10默认情况下应具有此功能。
- 6.启动软件，如果出现压力测量窗口，则表明安装成功。如果没有出现窗口，检查Windows设备管理器。
- 7.当压力板未连接或未插入时，尝试调出扫描界面会在左侧显示错误消息。

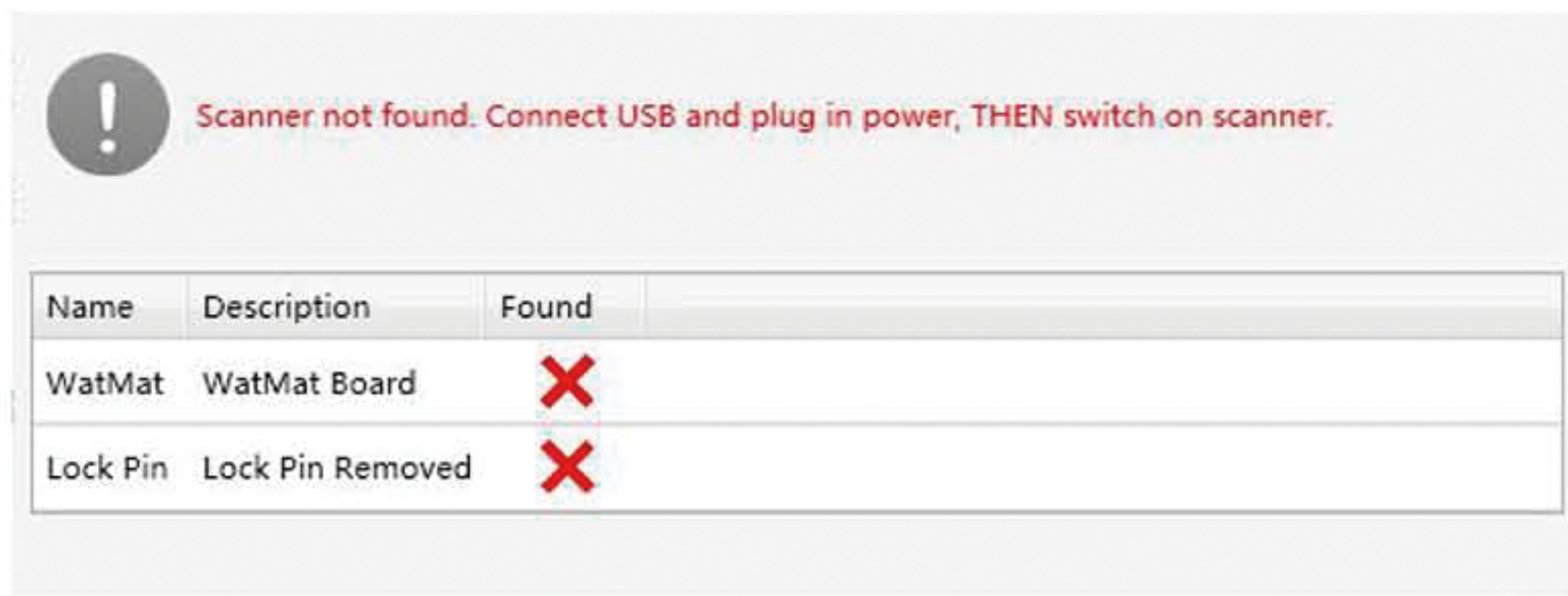


- 8.当压力板未插入时，尝试调出扫描界面会在中间显示错误消息。



四、DGA01软件启动和设置

1.在打开扫描仪电源之前，将扫描仪USB连接到PC。从桌面图标或“开始” -> “所有程序” ->启动软件。

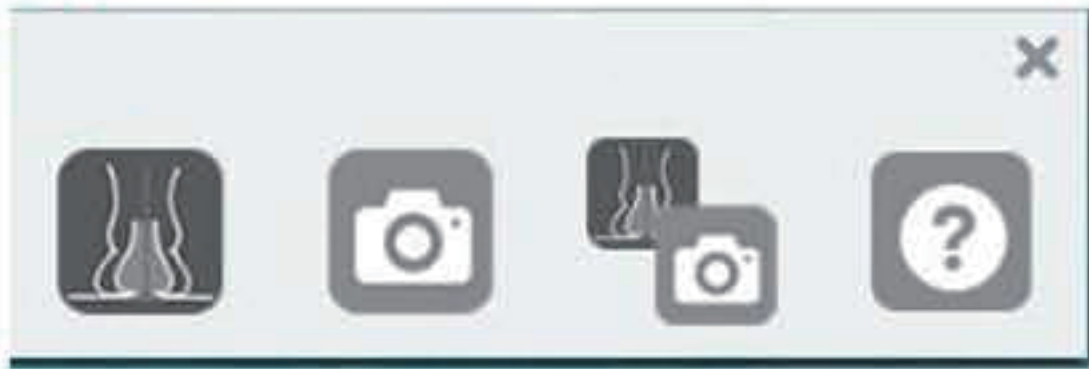

测量 拍摄 测量+拍摄 帮助

2.单击测量以启动测量界面。图标在下面列出。



新测量



打开文件



设置



静态测量



动态测量



查看报告



保存

3.测量之前，单击设置。




五、测量足部、足部分析

1. 无论压力板的位置如何，脚都必须根据压力板上的提示对应站立或行走。
2. 在允许测量之前,输入“姓名”、“手机号码”和性别“男/女”。在“设置”中将设置测量模式，设置测量时长和测量次数

First Name	Last Name	☒ Male ☐ Female
---	--	--

- 3.测试完成后，会显示对应的压力图

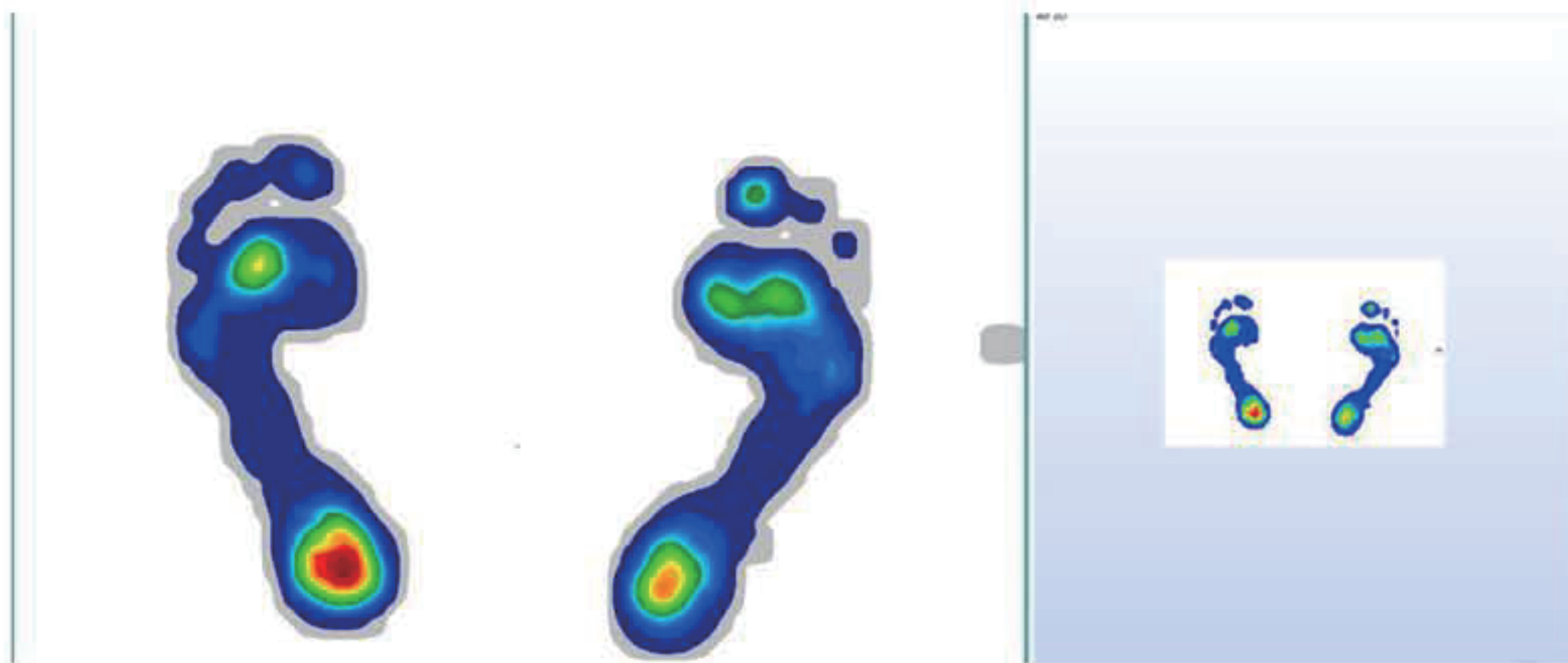


静态压力图





动态压力图

六、足部压力报告打印

1、点击“查看报告”，生成足部压力报告。

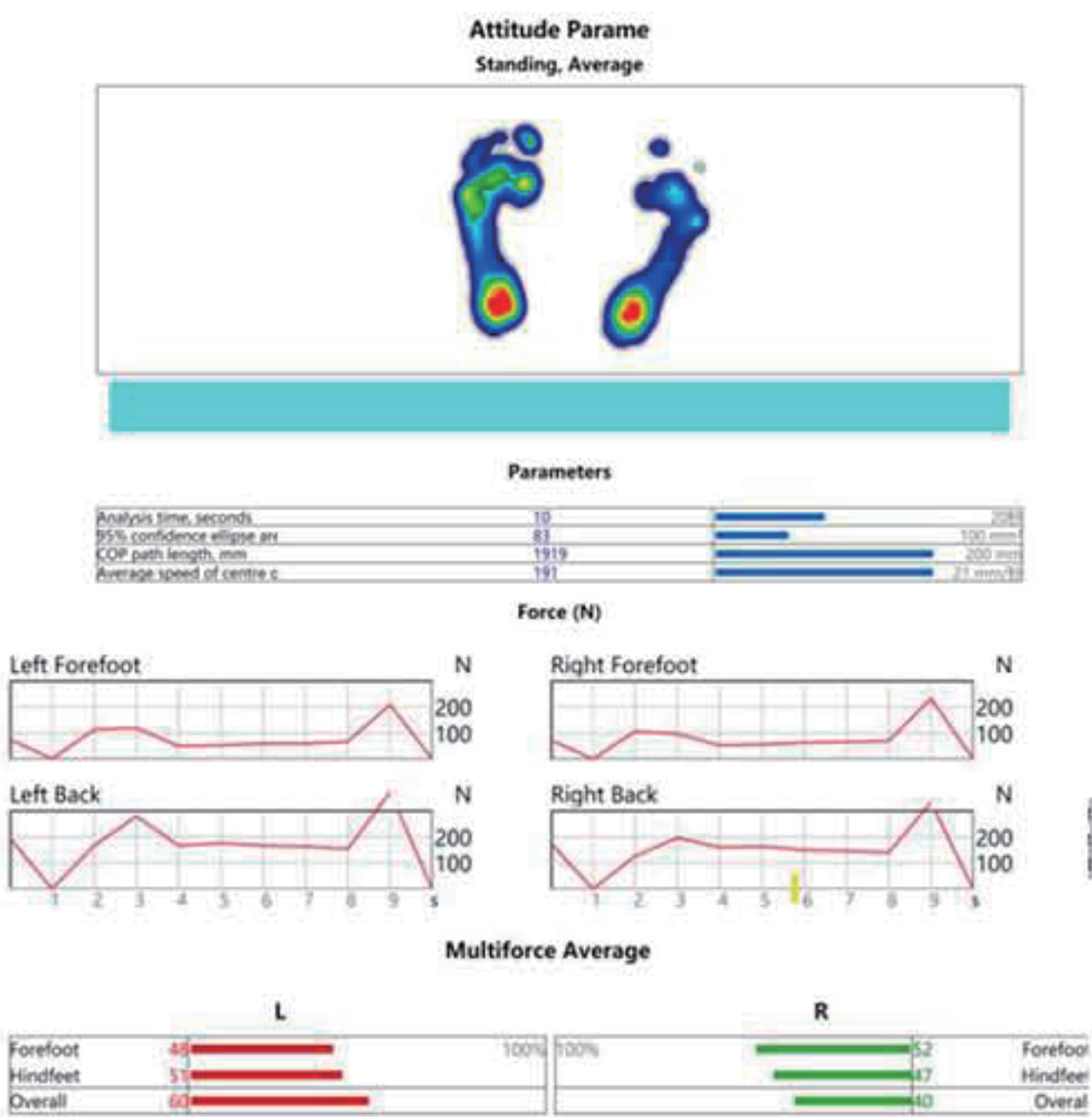

静态足底压力报告

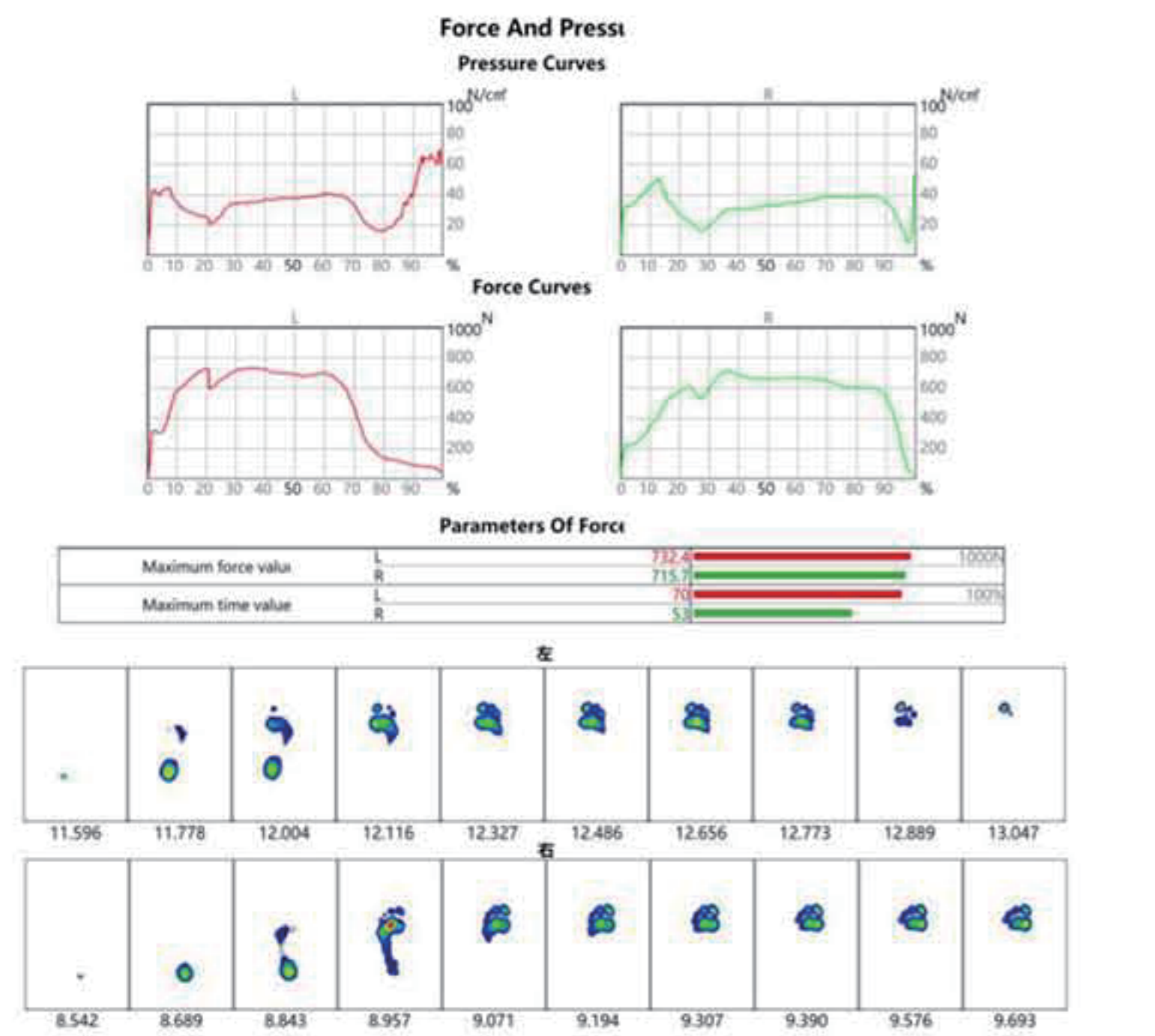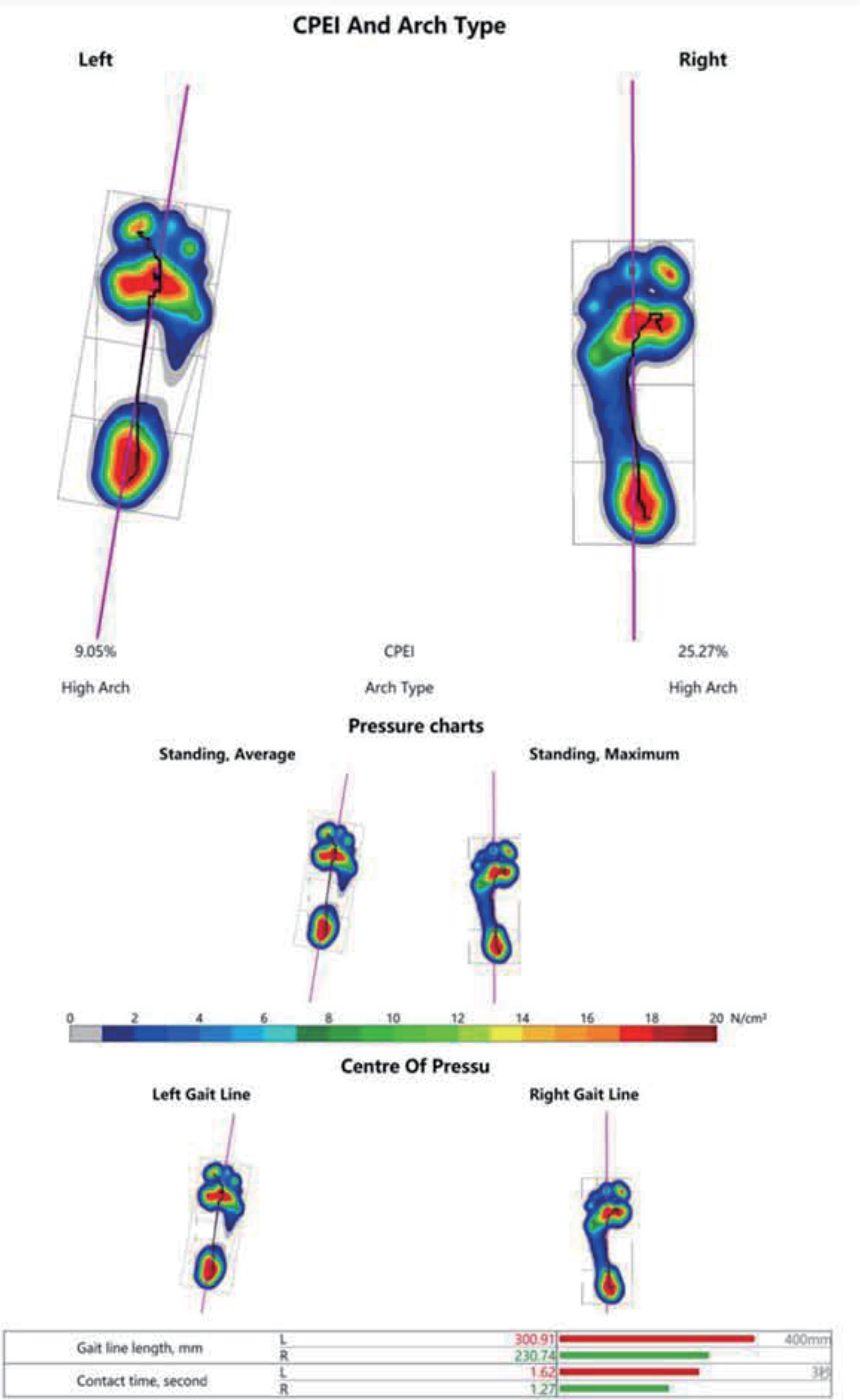

7、故障排除

- 1.当怀疑压力板出现问题时，请将压力板连接到计算机（已安装软件），并插入加密狗（U盘）。右键单击计算机->属性->设备管理器。请参阅软件安装部分以检查。
- 2.现在启动软件进行扫描，如果问题仍然存在，请与我们联系以获得更多支持。

8、软件版权

与本产品相关的所有文件，无论是线上还是离线，均包含开发商的专有和机密信息，并受版权法保护。未经开发商明确书面许可，不得向第三方披露、复制或以任何形式复制本文件的全部或部分内容。

本文件内容如有更改，恕不另行通知。图片仅供说明之用。实际的硬件和软件可能有不同的外观。商标和版权是其各自所有者的财产。

本文件作为相关产品的产品文件提供。在编制其中所载信息时已采取了合理的谨慎措施。但是，本文件可能包含遗漏、技术错误或印刷错误。

对于因使用本文件而造成的客户损失，开发商不承担任何责任。

上述声明适用于任何形式的产品文件，以任何方式交付，在线或离线，硬拷贝或电子拷贝。



公司官网



微信公众号

深圳简单医疗科技有限公司

Simple Medical (Shenzhen) Limited

总部地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路1010号智慧谷创新园519

总部电话：0755-86038563

总部邮箱：diego@simplegroup.net

网 站：www.simplegroup.net
www.simplemedical.cn